



Mädchensekundarschule
St. Katharina
Klosterweg 13
9500 Wil

www.kathi.ch
info@kathi.ch
071 911 46 46

Bedienungsanleitung wiederverwendbare Gesichtsmasken

Jakob Müller AG gründete neu die Firma TexMask GmbH in Frick.
(Informationen und Bilder von www.mytexmask.ch)



So legen Sie die Maske an

Waschen Sie zunächst Ihre Hände gründlich. Greifen Sie die Gummizüge der Maske und legen Sie deren Enden um Ihren Kopf. Gleichen Sie die Spannung der Gummizüge so aus, dass die Maske bequem sitzt. Hilfreich ist, die Seiten der Maske leicht zu raffen, sodass Gummizüge und Maske optimal sitzen. Die Maske wirkt optimal, wenn sie Nase und Mund bedeckt und seitlich nahtlos anliegt.



So lange können Sie die Maske tragen

Sie können die Maske zwischen zwei Waschgängen acht Stunden lang tragen. Ist die Maske vom Tragen durchfeuchtet, muss sie abgenommen und ausgetauscht werden. Beim Abnehmen berühren Sie – wie beim Anlegen – nur die Gummizüge. Waschen Sie sich anschließend gründlich die Hände.



So reinigen Sie die Maske

Bevor Sie die Maske erstmalig verwenden, waschen Sie sie bei 60 Grad. Masken, die Sie nicht sofort nach der Nutzung waschen, bewahren Sie in einem verschlossenen, von der restlichen Wäsche getrennten Behälter auf. Die Maske ist für ca. 10 Waschgänge geeignet.

Achtung – befolgen Sie folgende Hinweise

Die Maske darf nicht von Säuglingen, Kleinkindern und Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankten getragen werden und nur dann von anderen Personen, wenn sie vorher bei 60 Grad gewaschen wurde. Ist die Maske beschädigt oder entsteht ein Gefühl von Atemnot, darf sie nicht mehr genutzt werden. Entsorgen Sie die Maske in einem verschlossenen Müllbeutel.

Mund-Nasen Masken mit zwei Tragemöglichkeiten!

Den Videobeschrieb für die beiden Tragemöglichkeiten finden Sie auf der Startseite von www.mytexmask.ch.

Bitte beachten Sie, dass die Masken vor dem ersten Gebrauch gewaschen werden müssen.